

Používání nebulizéru: (pro typ koncentrátoru s nebulizérem)

Nalijte tekutý lék do hrníčku nebulizéru před započatím léčby. (Obrázek 5)

Připojte trubičku do výstupního konektoru nebulizéru (tento konektor je vybaven šroubovacím uzávěrem). Tekutý lék v hrníčku nebulizéru se začne rozprašovat, i když tento proces není velmi viditelný pouhým okem.



Obrázek 5

Pokud je léčivo v nebulizačním hrníčku vypotřebováno, zašroubuje výstup nebulizéru, přístroj tak automaticky přejde do standardního módu inhalace kyslíku.

Upozornění: "Nebulizační mód" přístroje musí být používán pouze s připojeným "nebulizačním" hrníčkem. Výstupní tlak je vyšší, pokud je přístroj zapnut v "nebulizačním módu". Prosím neinhaliujte kyslík v tomto módu bez nebulizačního hrníčku!